



Guide d'utilisation


Défibrillateur Automatique Externe (DAE)

UNE PERSONNE qui ne vous **REPOND PAS**, ne **REAGIT PAS** à votre demande et qui ne **RESPIRE PAS**, doit être **PRISE EN CHARGE** dans les **PLUS BREFS DELAIS** afin de lui **SAUVER LA VIE**.

DANS TOUS LES CAS:



Passez l'alerte ou faites passer l'alerte en composant le 15, le 18 ou le 112

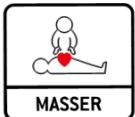

Effectuez la Réanimation Cardio-Pulmonaire (R.C.P) jusqu'à l'arrivée des secours.



Demandez et mettez en service le DAE le plus précocement possible puis reprenez la R.C.P.

1- Sortir le DAE de son support

Le support émettra alors une alarme permettant d'attirer l'attention d'éventuels personnes pouvant vous porter assistance.



2- Ouvrir le capot du DAE

Le défibrillateur s'allume automatiquement



3- Préparer la victime

3.1/ Installer la victime le plus rapidement possible au sol, sur une surface plane et non mouillée.

3.2/ Retirer les vêtements situés au niveau du thorax de la victime pour faciliter le positionnement des électrodes.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces dernières, les victimes à forte pilosité doivent être rasées au niveau de l'emplacement de pose des électrodes. Cette zone devra également être sèche. Vous trouverez dans la sacoche rouge, un kit de secours comprenant: un rasoir, ainsi que des compresses prévus à cet effet.



4- Placement des Électrodes


4.1/ Ouvrir l'emballage des électrodes

Pour l'adulte et l'enfant de **plus de 25kg**, utiliser les électrodes **ADULTES** (pré connectées).

Si la victime fait **moins de 25 kg**, utiliser les électrodes **pédiatriques** présentes dans la sacoche de transport rouge.




4.2/ Retirer la protection des électrodes.

Ne retirer le film protecteur des électrodes qu'au moment de leur application.

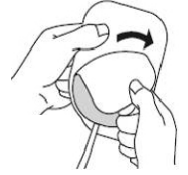

4.3/ Placer les électrodes en suivant les instructions figurant sur l'emballage.

Placer les électrodes fermement sur la poitrine nue de la victime.

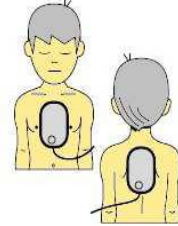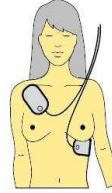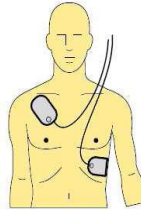

Adulte & Enfant
de **+ de 25kg**

Enfant & Nourrisson
de **- de 25kg**

5- Analyse du Rythme Cardiaque

Lorsque les électrodes sont correctement appliquées, le dispositif commence automatiquement l'analyse du rythme cardiaque et vous ne devez plus toucher la victime.

L'appareil émet les messages vocaux suivants :

“Ne touchez pas la victime, une analyse du rythme cardiaque va être effectuée”
« Analyse du rythme cardiaque en cours »

6- Défibrillation

CAS DE FIGURE N°1: Le DAE indique la nécessité de délivrer un choc électrique

“Ne touchez pas la victime. Attention le choc va être délivré »

Le dispositif commence à se charger (émission d'un BIP sonore). Cette opération ne prend que quelques secondes. Quand la charge est complète, le dispositif émet le message vocal suivant :

« Trois, deux, un... Le choc a été délivré”

Après l'administration du choc, le dispositif invite le secouriste à effectuer la Réanimation Cardio-pulmonaire (R.C.P).

« Vous pouvez de nouveau toucher la victime »

CAS DE FIGURE N°2: Le DAE indique que le choc électrique n'est pas nécessaire

“Le choc n'est pas nécessaire”
« Vous pouvez de nouveau toucher la victime »

Suivre les indications vocales de l'appareil tout au long de son utilisation